

DUBBEL BESCHERMENDE KUSSENS met EPITHELIUM 26®

INDICATIES:

Voorkomen en verlichten van pijn onder de voorvoet (eelt, warm gevoel, lang staan ...) en pijn veroorzaakt door wrijving op de Hallux Valgus.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Op de huid dragen.
- Het bedrukte gedeelte van de stof moet in contact zijn met de voetzool. Niet omdraaien.
- Glijd de voet in het kussens, plaats het bevestigingslipje tussen de grote teen en de tweede teen.
- Voor een optimale bevestiging niet met blote voeten dragen maar met een kous, panty of sokken er over heen. Deze moeten groot genoeg zijn, zodat de voet niet wordt samengedrukt.

FUNCTIONALITEIT

- Epithelium 26® is een door podologen gepatenteerde "vervanging van de vetkussentjes onder de voet". Door zijn mechanische eigenschappen vervangt deze siliconengel inderdaad de slecht functionerende vetkussentjes die pijn veroorzaken: hij verdeelt het gewicht van het lichaam perfect over het hele steunvlak.
- De aanwezigheid van Epithelium 26® onder de voetzool en op eeltknobbels (in de vorm van een dunne module) zorgt ervoor dat de Kussentjes met dubbele bescherming doeltreffend de pijn verminderen zonder extra druk wordt uitgeoefend.

De dubbel beschermende kussens zijn een eenvoudige bescherming die de hallux valgus knobbel niet kunnen corrigeren.

CONTRA-INDICATIES:

- Niet gebruiken op een huidletsel.
- Bij personen die lijden aan arteritis, diabetes, een polyneuropathie of een neuropathie van de onderste ledematen of spataderen: gebruik het product nooit op een wond, houd de voet in de gaten tijdens het gebruik en vraag altijd advies aan uw arts of een podoloog. Het lipje kan tussen de tenen wrijven. Het wordt dus aan diabetici met een neuropathie afgeraden om dit te gebruiken.ng.

ONDERHOUD

- In de machine wassen op 30°C, in het bijbehorende wasnet of met de hand (zonder wrijven).
- Aan de lucht laten drogen. Niet strijken.

SAMENSTELLING: 85% siliconen, 15% polyamide/elastaanstof.

De materialen werden onderworpen aan alle wettelijk verplichte tests opgelegd door de ISO 10 933-1 norm betreffende producten die in contact komen met de huid. Indien een probleem mocht voordoen, gelieve het gebruik ervan onmiddellijk te stoppen en het bedrijf MILLET Innovation hiervan verwittigen. MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebruik-sadvies van de fabrikant niet wordt gerespecteerd. De referentietaal is Frans. Initieel CE-label: 2001.



Machine wasbaar
op 30°C.



Niet strijken,
geen stoom



Niet stomen.



Niet drogen in de
droogtrommel.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld van MILLET Innovatie - onderzoek.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Liorio/Drôme - FRANCE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.nl