



MASCHERINA FACCIALE

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZA

Per proteggere la propria salute e quella degli altri è importante attenersi a quanto indicato nelle presenti istruzioni.

- Indossare sempre la mascherina quando si è **a contatto con persone diverse da quelle con cui si vive.**
- Controllare sempre che la mascherina sia **correttamente posizionata e che copra il naso e la bocca.**
- Attenzione: la presente mascherina non è adatta alle persone malate. Chiedere il parere del proprio medico.
- La presente mascherina non è destinata al personale medico e sanitario.
- **Indossare la mascherina non fa venire meno l'importanza delle altre misure di prevenzione** (lavarsi spesso le mani, distanziamento sociale, limitazione dei contatti con altre persone). **La mascherina offre solo una barriera fisica in più, da utilizzare soprattutto quando si è a stretto contatto con altre persone.**



A B o C D E F

2 opzioni per indossare
la mascherina

COME INDOSSARE LA MASCHERINA?

Prima di indossarla:

1. Prima di toccare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone (Schema A) o con una soluzione idroalcolica.
2. Ispezionare la mascherina per controllare che non presenti fori, strappi o segni di deterioramento.
3. Si consiglia di indossare la mascherina su pelle nuda, evitando il contatto con i capelli.
4. Non modificare mai la mascherina in nessun modo.

Per indossarla:

La mascherina include dei cordini elasticizzati legati in modo tale da essere posizionati dietro le orecchie (Schema B). È tuttavia possibile legarli diversamente per farli passare dietro la testa (Schema C). Per modificare la configurazione dei cordini, sciogliere il nodo sinistro e quello destro e successivamente legare insieme prima i cordini superiori e poi quelli inferiori.

1. Prendere la mascherina tenendola per i cordini elasticizzati.
2. Applicarla a livello della bocca.
3. Far passare i cordini elasticizzati dietro le orecchie (Schema B) o dietro la testa (Schema C).
4. Posizionare la mascherina in modo tale da coprire il naso, la bocca e il mento e accertarsi che l'elemento in silicone venga a trovarsi sopra il setto nasale.

Mentre si indossa:

1. Evitare di toccare e spostare la mascherina.
2. Non disporre mai la mascherina sulla fronte o sul mento.

Occorre sostituire la mascherina:

1. Quando si desidera bere o mangiare.
2. Se la respirazione diventa difficoltosa.
3. Se la mascherina è umida.
4. Se la mascherina è danneggiata.
5. Se la mascherina si è deformata e non si regge più sul viso.

Per toglierla:

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.
2. Sganciare i cordini elasticizzati per staccare la mascherina dal viso.
3. Nell'attesa di lavarla, isolare la mascherina in un sacchetto di plastica chiuso.
4. Se la mascherina è deformata o usurata, gettarla immediatamente in un cestino che è possibile chiudere.
5. Per finire, lavarsi nuovamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.

CURA DELLA MASCHERINA?

Prima dell'apertura:

Conservare la mascherina nell'imballaggio protettivo originale, in un luogo asciutto e al riparo dal sole. Per mantenere intatte tutte le caratteristiche, conservare la mascherina in un luogo con umidità massima del 75% e temperatura compresa tra -2°C e +55°C.

SICUREZZA

Nonostante la cura avuta nella produzione della presente mascherina, spetta al solo utente, e non al fabbricante o al fornitore, accertarsi che la mascherina scelta sia adatta alle caratteristiche del luogo in cui è utilizzata. Attenersi scrupolosamente ai consigli e alle modalità di utilizzo sopraindicati.



Réf. 13073-A
07/2020



Lavabile in
lavatrice a 60°C.



Stirare a
120°C



Non lavare
a secco.



Non sottoporre
a candeggio.



Asciugare in asciugatrice
fino a 60°C.



Verdere la
confezione.

FABRICANTE : MILLET Innovation 309 allée des Lavandes
Z.A. Champgrand 26270 LORIOLE-SUR-DRÔME

www.epitact.it